


Instructions du test

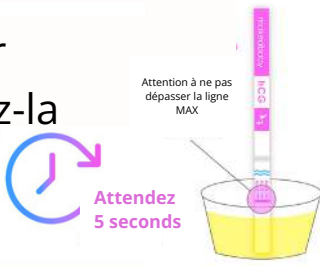
Veillez lire TOUTES les instructions avant d'ouvrir ou d'utiliser le test. Si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez nous contacter à support@niagarareproductivejustice.com

- 1 Retirez le test de l'emballage en déchirant l'encoche.


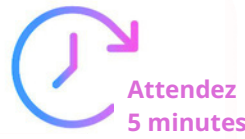

- 2 En tenant la bandelette par l'extrémité colorée, plongez-la dans l'échantillon jusqu'à la ligne maximale.

Attention à ne pas dépasser la ligne MAX

Attendez 5 seconds

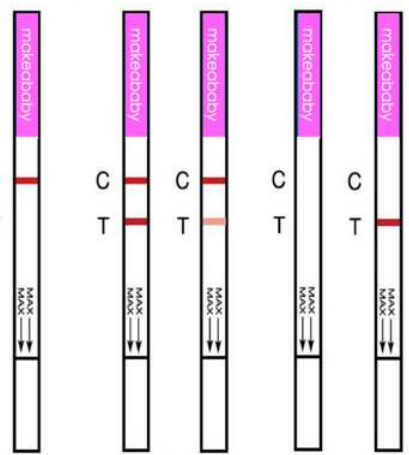

- 3 Posez la bande à plat sur une surface non absorbante.

Attendez 5 minutes


- 4 Lisez les résultats dans les 30 minutes. Les résultats positifs peuvent être affichés immédiatement, les résultats négatifs peuvent être lus en 5 à 10 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Ligne de contrôle → C
Ligne de test → T



Négative
Une bande de couleur rose apparaît uniquement au niveau de la région de contrôle

Positive
Une bande de contrôle rose clair et une bande de test détectable apparaissent. Cela indique une grossesse

Invalid
Aucune bande visible au niveau de la région de contrôle. Répéter avec un nouvel appareil de test.