


Instrucciones de examen

Por favor lea TODAS las instrucciones antes de abrir o usar el examen. Si necesitas mas información, puedes contactarnos en: support@niagarareproductivejustice.com


1 Remueva el examen del paquete arrancando por el corte.



2 Agarre la tira por el lado de color, después inmersa la tira en la muestra hasta que llegue a la línea de máximo.


Con Cuidado de no excedir la línea máxima

Espera 5 segundos




3 Ponga la tira en una superficie plana y espere 5 minutos.

Espera 5 minutos



4 Lea los resultados en 30 minutos. Los resultados positivos pueden verse inmediatamente y los negativos se pueden leer de 5 a 10 minutos.

INTERPRETACION DE RESULTADOS

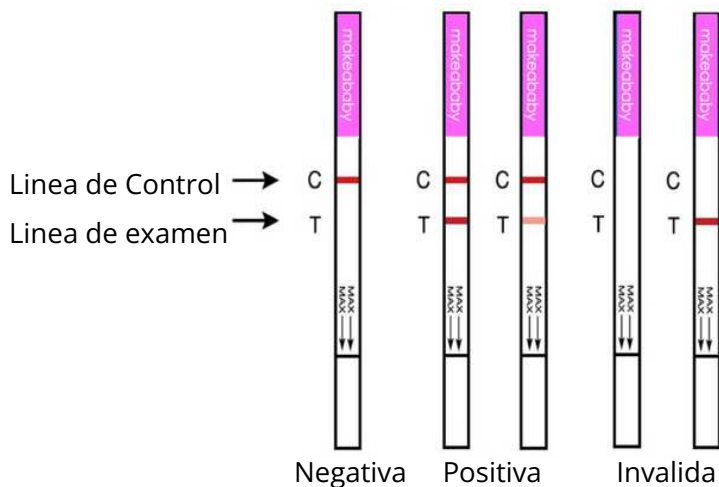

Negativa

Una línea color rosa aparece solo en la línea de control.

Positiva

Una línea distinguida rosa en la línea de control y en la línea de examen aparece. Esto indica embarazo.

Invalida

No hay línea en la línea de control. Repita con un examen nuevo.